



**CryoMed**

Protégelo, guardando sus células madre.


## PROCESO DE RECOLECCION DE SANGRE DEL CORDON UMBILICAL

# IMPORTANTE

- 1** Se deberá tomar 3 tubos de sangre materna antes del parto, los cuales deberán ser identificados y colocados dentro del kit.  
**Cuando el parto es múltiple, tomar solamente 3 tubos de sangre materna.**



Realizar la recolección de sangre del cordón umbilical siguiendo los pasos básicos:

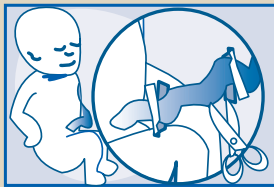

Pince y corte

- 1.** Al momento del nacimiento coloque la 1era pinza cerca del recién nacido y a 5cm la 2da, corte entre las pinzas para separar al bebé.



Limpie




Recolecte

- 2.** Limpie el área de punción, lo más cercano de la pinza.

- 3.** Insertar la aguja en la vena del cordón umbilical (con unos 30 - 45 grados de inclinación).



Exprima

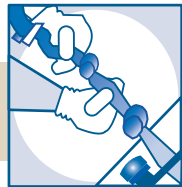

Asegure

- 4.** En caso de estenosarce el cordón, pinzar nuevamente siguiendo los pasos anteriores hasta que el cordón quede completamente vacío.

- 5.** Recolecte la mayor cantidad de sangre posible, mínimo 90 gramos.

- 6.** Exprima la sangre restante de la manguera.



Mezcle



Etiquete

- 7.** Retire la aguja y haga tres nudos.

- 8.** Invierta la bolsa suavemente para homogenizar la muestra.

- 9.** Pese, etiquete la muestra y los tubos de sangre materna con todos los datos solicitados.

**2**

Comuníquese durante las 24 horas del día con Cryo-Med, a los teléfonos:

**3**

- Quito: **092 479 950 / 092 416 081 / 099 720 806**  
 Guayaquil: **092 479 804 / 092 479 828 / 092 479 810**  
 Cuenca: **092 479 878 / 092 479 755**  
 Ambato: **092 027 695 / 092 741 255**

Mantener a temperatura ambiente la muestra recolectada, en quirófano o en la habitación de la madre.

**4**